


# Frakturrisiko ved å legge store komposittfyllinger eller bygge konuser i kompositt ?

For både tannlegen og mange pasienter kan en stor komposittfylling være bedre enn en kostbar krone eller Zirkoniumkrone. Da kan det være greit å ha en kompositt som har en spesielt høy brudd- og bøyestyrke uansett om du har en diger MOD, kusefraktur eller en konus til krone/bro.


Spesielt etter rotfyllinger er tannen utsatt for frakturer, og den samme everX Flow fiberforsterket kompositt kan være løsningen også i slike kasus.

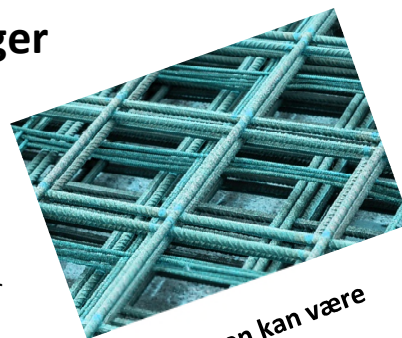

Løsningen kan være  
**armering !**

De små fibre i flowmaterialet fungerer som armeringsjern i et betongdekk. Skulle en fraktur oppstå, stoppes den ganske enkelt av fibre i kompositten og derved *reduseres risikoen* for knekket tann eller fyllning. Slik får dine pasienter en rimeligere og sikrere behandling uten fatale frakturer.

everX Flow leveres i en fin sprøyte som gjør det enkelt å applisere kompositten, også i overkjeven, *uten at den renner bort*. Dessuten flyter everX Flow fint inn i alle undersnitt. Bond med hva du vil, men G-Premio Bond er utviklet for å maksimere everX Flow's binding til kavitsveggene.

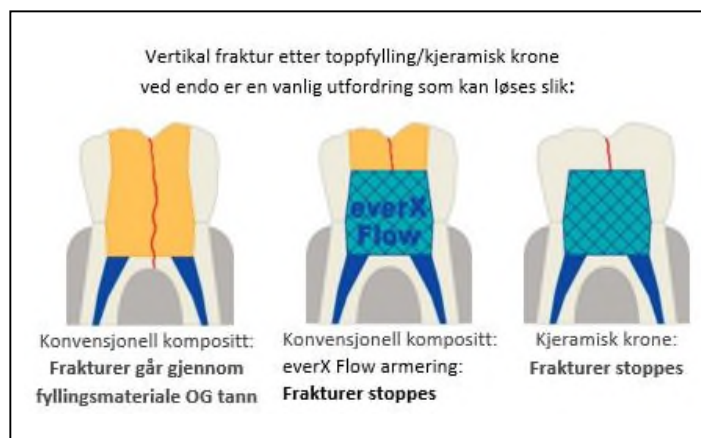

everX Flow's overlegne styrke gir ikke alltid ønsket estetikk: Derfor skal kompositten du er fortrolig med brukes til å dekke everX Flow der du vil ha estetikk og polérbare overflater.

EverX Flow finnes i to farver: «Bulk» der gjennomskinnelighet ikke betyr noe, og «Dentin» der transparenss er viktig. Bruddstyrken er på 2,88 MPa (Dentin: 2,63 MPa); bøyestyrken er på 171Mpa.

Praktisk løsning ved store komposittfyllinger:



Etter bonding legges det første komposittlaget med everX Flow Dentin-shade, maks 2 mm herdedybde pr. lag. Herde. Velg om du vil høyne estetikken med en kompositt-«vegg» i den apoksimale kassen. Gjør plass til topplaget med en konvensjonell kompositt (her er brukt GC Essentia). Konturér og puss ferdig.

Case: Dr. Georg Benjamin, Germany - everX Flow Dentin + GUI A3 + Essentia U

Eksempel på riktig sted og bruk av everX Flow til konusoppbygging



Bruk: Dentin-farge

KONTAKT GC, Robert Fitus, [robert.fitus@gc.dental](mailto:robert.fitus@gc.dental) for mer informasjon, eller bestill den direkte hos ditt depot.

Spesialtilbud:

**everX Flow/GUI Starter Kit Syringe, kr 1099,-**

Contents: everX Flow Syringe 2mL Bulk shade x1, everX Flow Syringe 2mL Dentin shade x1, G-ænial Universal Injectable Syringe 1mL A2 shade x1, G-ænial Universal Injectable Syringe 1mL A3 shade x1, Dispensing Tip III Plastic x40, Dispensing Tip Long Needle x20, Light-protective Cap x4.

**[Download brochure](#)**